



**フットスイッチを安定させる
快適・便利なストッパー。**



フットスイッチストッパー

ダブルの効果で滑りにくい!

- 滑りにくい素材とかかとを置くベース部によるダブルの効果で滑りを低減。

置くだけの簡単設置!

- 使用方法はフットスイッチの下に置くだけ。

仕様

製品名：フットスイッチストッパー(商品番号 S031207-008)
サイズ：縦 420 mm × 横 200 mm × 高さ 30 mm
色：ブルー
単位：1箱 1個入り
素材：エチレンプロピレンゴム

お手入れ

清拭及び洗浄する場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布またはスポンジ等を用いて行き、十分に乾燥させてください。

ご注意

- 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をお読みください。
- 本製品は、医療機関でフットスイッチを使用する際に、フットスイッチを滑りにくくするためのものです。
- 下記の場合、本製品を使用しないでください。使用者が滑って転倒したり、誤ってフットスイッチを押してしまう可能性があります。
 - ・濡れている床面で本製品を使用した場合
 - ・ベース部にしわが入ったまま本製品を使用した場合
 - ・本製品にちり、ほこり及び汚れが付着している場合
- 本製品を2つ以上重ねて使用すると、段差が生じ、使用者が躓いたり、誤ってフットスイッチを押してしまう可能性があります。
- 1個の本製品に対し1台のフットスイッチを使用してください。
本製品の開口部にフットスイッチのコードが挟まり、コードが破損する可能性があります。

● 仕様・外觀および契約条件等については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティーメディクス株式会社

Tmedix

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル5F
<http://www.tmedix.com>

お問合せ先
企画部 商品開発チーム
TEL 03-3349-8590 FAX 03-3349-8771

取扱販売店名