

## 内視鏡保管時の注意


- 内視鏡を保管庫へしまうときは必ず本製品を取り外してください。

## スコープ先端保護チューブ保管時の注意

- 内視鏡保管庫に運搬する際に装着した本製品は洗浄を行ってください。洗浄後、高水準消毒または滅菌を行ってください。
- 本製品が高水準消毒または滅菌のレベルが保たれるように保管してください。

## 保管

- 1** 洗浄および高水準消毒  
または滅菌済みの  
本製品を装着し、運搬します。  
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

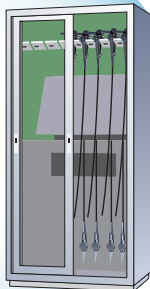

内視鏡保管庫

### 4-a 保管庫へ

- 洗浄および高水準消毒  
または滅菌済みの  
本製品を装着し、運搬します。  
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

### 4-b 検査室へ

- 洗浄および高水準消毒  
または滅菌済みの  
本製品を装着し、運搬します。  
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

## 検査

- 2** ● 検査前  
本製品が取り外されている事を確認します。  
※取り外し方は、裏面をご参照ください。  
● 検査後  
再び本製品を装着し、運搬します。  
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

## 洗浄

- 3** 必ず本製品を内視鏡から外し、洗浄を行ってください。  
洗浄後、高水準消毒または滅菌を行ってください。  
※取り外し方は、裏面をご参照ください。



内視鏡

高水準消毒または滅菌

先端保護チューブ

内視鏡洗浄



製品に添付されている取扱説明書を必ずご参照ください。

